

**POSTURAL**

E X P E R I E N C E

# INSTALLAZIONE STAFFA MURO



(Fig. 1)

### **Centratura con dima rigida (Fig. 1)**

Fissare la staffa a muro ad una altezza compresa tra gli 80 e i 90 CM da terra (misura B).

La scelta precisa per il posizionamento è dettata dal fatto di avere anche bambini come soggetti, in questo caso è preferibile posizionare la staffa nell'intorno degli 80 CM da terra.

Se abbiamo tra i nostri soggetti persone di altezza vicina o superiore ai 2 metri è meglio posizionare la staffa nell'intorno dei 90 CM da terra.

Il centro della dima rigida andrà poi collocato ad una distanza di 220 CM dalla lente della webcam, quindi circa a 235 CM dal muro (misura A), in modo che la dima sia perfettamente ortogonale alla lente (se disponibile aiutatevi con una livella laser).

Visionate la guida 'SETTAGGIO WEBCAM' per maggiori informazioni.